

TERMOMETR MEDITEMP

CENA:

21,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY

Kod EAN: 5907438902683



OPIS PRZEDMIOTU



Termometr elektroniczny MediTemp Sanity służy do mierzenia temperatury dla całej rodziny. Jest tańszą alternatywą dla termometru bezdotykowego i wygodniejszą, szybszą, a także bezpieczniejszą dla termometru szklanego. Można nim mierzyć temperaturę doustnie, rektalnie oraz pod pachą. W przypadku pomiaru doustnego i rektalnego przybliżony czas wynosi 40 sekund, a w przypadku pomiaru pod pachą ok. 1 minuty. Sygnał dźwiękowy oznacza koniec pomiaru. Termometr automatycznie zapisuje ostatni wynik i ma wskaźnik wymiany baterii na wyświetlaczu.

Specyfikacja techniczna:

Zakres pomiaru: 32,0°C - 42,9°C
Sygnalizacja dźwiękowa stanu gorączki: $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$
Automatyczne wyłączenie: 8 minut $\pm$ 2 minuty
Bateria LR41 lub SR41
Trwałość baterii: ponad 200 godzin działania
Środki ostrożności:

Termometr może być używany tylko w obecności osoby dorosłej. Nie chodź, nie biegaj ani nie rozmawiaj podczas mierzenia temperatury. Gdy termometr nie jest używany, przechowuj go w etui ochronnym. Nie przechowuj termometru w miejscu, w którym może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu lub wilgoci. Unikaj ekstremalnych temperatur. Unikaj upuszczania termometru lub poddawania go silnym wstrząsoms. Nie demontuj części termometru, z wyjątkiem wymiany baterii. Termometr należy czyścić przed i po każdym użyciu miękką szmatką

rozcieńczoną alkoholem izopropylowym lub przemyć zimną wodą z mydłem. Nie zanurzaj termometru w wodzie ani alkoholu. Nie mocz ani nie sterylizuj urządzenia we wrzącej wodzie ani w autoklawie gazowym lub parowym.

Sposób użycia termometru:

Należy nacisnąć przycisk włączenia / wyłączenia, żeby włączyć urządzenie. Termometr powinien wydać krótki sygnał dźwiękowy i wyświetlić test wyświetlacza, co potrwa około 2 sekund. Następnie wyświetli się ostatnio zmierzona temperatura ze znakiem "M" w prawym rogu. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 37,0°C. Gdy wyświetlane jest „Lo” i migająca jednostka °C (°F), termometr jest gotowy do pomiaru temperatury. Jeśli jednak temperatura otoczenia jest wyższa od 32,0°C, zamiast Lo będzie wyświetlana temperatura pomieszczenia. Aby wyłączyć termometr, należy nacisnąć przycisk włączenia / wyłączenia (termometr wyłącza się automatycznie po około 10 minutach bezczynności).

